

Instrucciones de Instalación

Riel Suspendido UltraCube®

FIG. 1

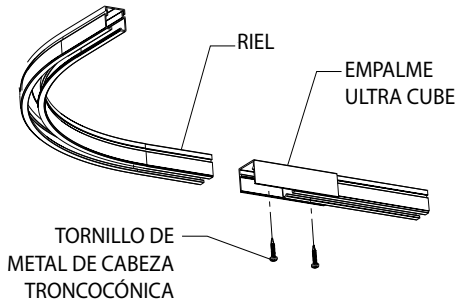


FIG. 2


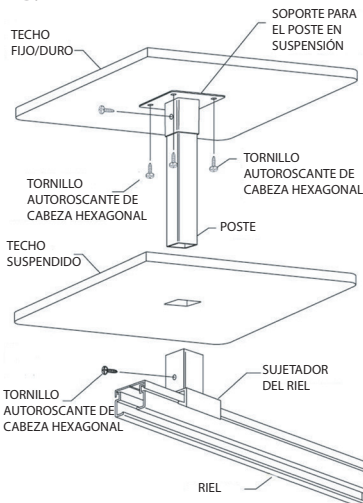


FIG. 3

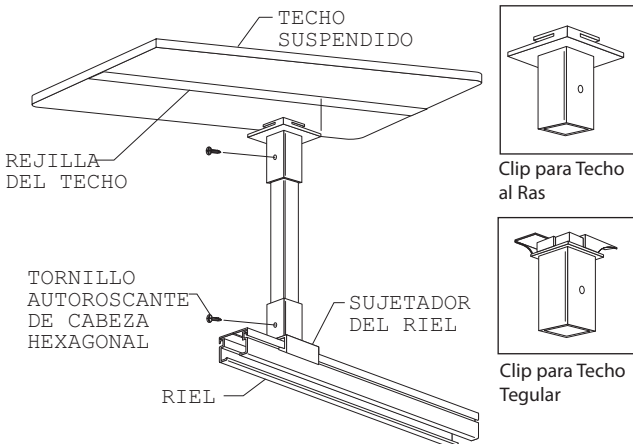

Nota: Verifique que el techo falso esté instalado y esté funcionando apropiadamente antes de instalar el riel.

1. Coloque las secciones de riel y las partes curvas sobre el piso. Una las secciones curvas con las rectas con un empalme. Sujete el empalme al riel con tornillos de chapa. Recorte las secciones del riel según sea necesario de acuerdo a la configuración. VER FIG. 1

Montaje a un techo fijo/duro. VER FIG. 2:

A1. Sujete el soporte superior al techo con uno de los sujetadores apropiados para el sustrato. Por ejemplo, tornillos para tablaroca al instalar en tablaroca. Los soportes deben estar localizados en los empalmes y a cada 2 pies de distancia en donde el riel esté recto.

A2. Corte el poste al largo apropiado y sujételo a la parte superior del soporte.

A3. Corte agujeros cuadrados atravesando el techo para colocar los postes. Atornille el portador del riel inferior al poste.

A4. Sujete el ensamblaje del riel al portador inferior del riel en el poste.

A5. Sujete el soporte en L en donde el riel se una a la pared. Taladre agujeros en el soporte en L y sujételo a la pared con dos tornillos de chapa #10 x 1-3/4" y con anclajes de pinza. Fije el riel al soporte en L con un tornillo autoroscante de cabeza hexagonal #8x1/2". VER FIG. 4.

Con los clips de soporte sujete a las rejillas del techo en forma suspendida. VER FIG. 3:

B1. Sujete los clips de soporte, para instalaciones en suspensión, en las rejillas del techo utilizando un clip a cada 2 pies. Utilice los clips enrasados para las losas de techo al ras y clips regulares para las losas de techo con bordes regulares.

B2. Corte el poste al largo apropiado y fíjelo a los clips para techo.

B3. Atornille el portador del riel inferior al poste.

B4. Sujete el ensamblaje del riel al portador inferior del riel sobre el poste.

B5. Instale el soporte en L en donde el riel se una a la pared. Taladre agujeros en el soporte en L y sujételo a

IPC.1771/REV.11

Instrucciones de Instalación

Riel Suspendido UltraCube®

FIG. 4

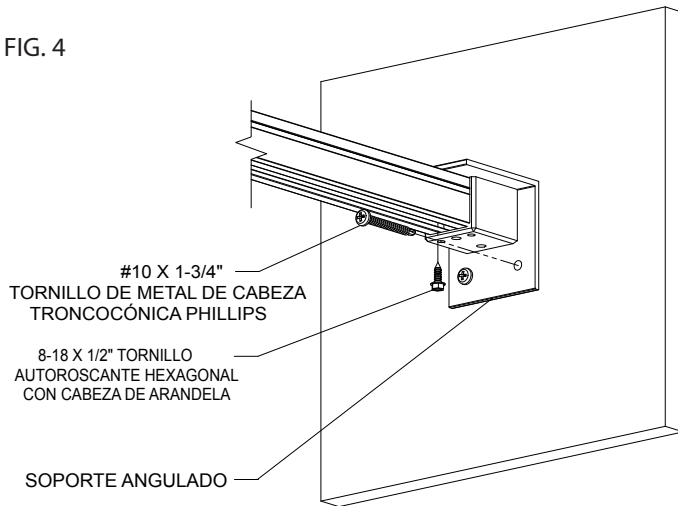


FIG. 5


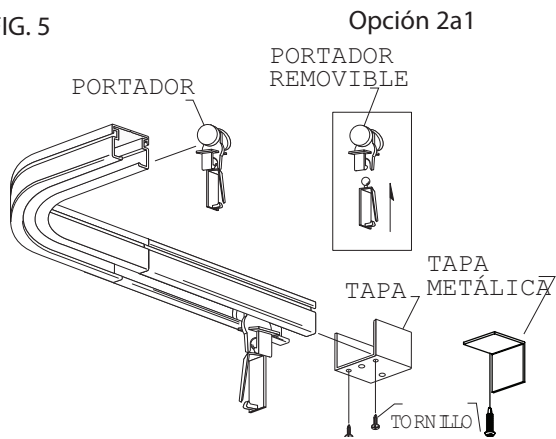


FIG. 6

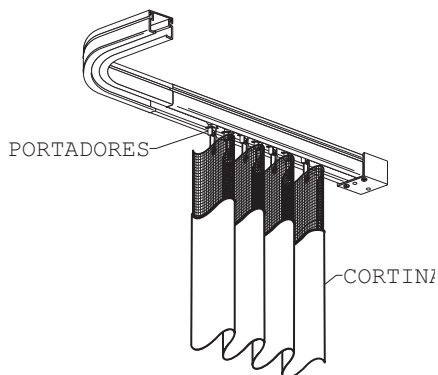

la pared con dos tornillos de chapa #10 x 1-3/4" y con anclajes de pinza. Fije el riel al soporte en L con un tornillo autorroscante de cabeza hexagonal #8x1/2". VER FIG. 4.

2. Deslice los portadores en el riel y coloque las tapas (plásticas o de metal) en los extremos abiertos. VER FIG. 5

Opción 2a. Si está utilizando el portador removible:

2a1. Encaje el portador en el sistema.

2a2. Instale los ganchos en los arandelas de la cortina. Verifique que los portadores estén seguros en su lugar.

2a3. Deslice los portadores en el riel.

*Mientras estos productos están diseñados para aplicaciones de salud mental, no garantizan la seguridad del paciente.

3. Sujete las cortinas a los portadores. VER FIG. 6